


クラウン・ブリッジ オートリムーバー SR(SAFE RELAX)

歯科用マイクロモーターに接続することにより、
仮着・合着のブリッジやクラウンをすばやく撤去

- プロビジョナルレストレーションの撤去に
- インプラント上部構造の撤去に
- 審美補綴物の撤去に



フックチップの軸部をハンドピース奥まで挿入し、90°回転させて装着します。

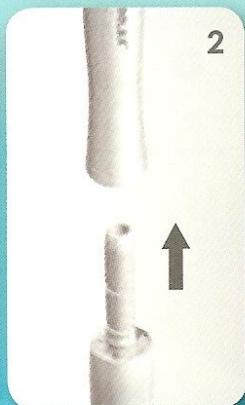

ハンドピースを歯科用マイクロモーターに接続します。



フックを補綴物に引っ掛け、ハンドピースを引っ張ります。(図はフック#5928ロング臼歯部用)




フットペダルを踏んで、徐々にマイクロモーターを回転させます。

反動がなく安定したトルクで補綴物を撤去

手動式リムーバーに比べて、1回あたりのストロークの負担が少なく、常に一定の牽引運動を持続して与えます。作動時は、垂直方向に負荷がかかるため、近遠心や頬舌方向への衝撃が少なく、患者さんに与える不快感を緩和し、インプラントや骨組織、支台歯への損傷が軽減されます。

●オートリムーバーと手動式リムーバーの比較

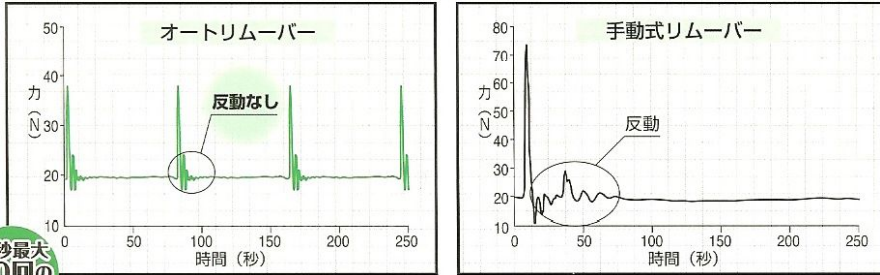


毎秒最大
20回の
ストローク

※仮着・合着セメント用になり、接着セメントには使用できません。

ワイヤーチップ・セラムチップの使用例


ワイヤーチップ (ロングスパンブリッジの場合)

ワイヤーチップを数力所に装着し、順番に振動を与えて撤去します。

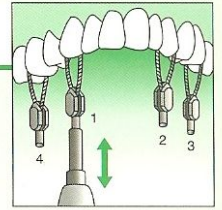


ワイヤーチップ (キャストコアの場合)

直径1mm程の穴を開け、そこにワイヤーを通して撤去します。

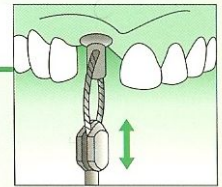

セラムチップ (3,4歯のブリッジの場合)

図のようにワイヤーを通して撤去します。3歯ブリッジの場合は95mm、4歯ブリッジの場合は150mmのワイヤーを使用します。

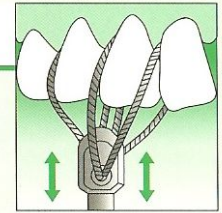


スピーディに補綴物を撤去

毎秒最大20回のストロークを常に一定の運動で与えるため、補綴物撤去を容易にし、作業時間も短縮できます。ストロークはマイクロモーターのスピードに比例して調整できます。

(マイクロモーターの推奨回転速度:5,000~25,000rpm)

※合着が強固で撤去が困難な場合を除く

ISO規格なので、モーターとの着脱はワンタッチ

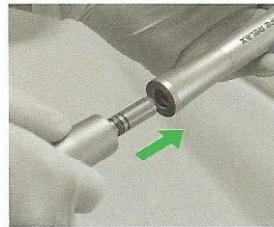

ハンドピースも付属品もオートクレーブ滅菌が可能 (136℃以下)

トルク圧の調整も可能

リングを回すだけでトルク圧(牽引力)を変えられます。



※モーターを作動させた状態でリングを回さないでください。

症例や部位に応じたフックやワイヤーの選択ができます。

#5925 90度 (ブリッジ用)
#5927 ショート (前歯・小臼歯部用)
#5929 フラット (前歯部用)

#5928 (臼歯部クラウン用)
#5927 (前歯・小臼歯部用)
#5929 (前歯部用)

ワイヤーチップ (前臼歯部ブリッジ用)
ワイヤーチップ (前臼歯部ブリッジ用)
セラムチップ (ロングブリッジ用)

#5925 90度 (ブリッジ用)
#5927 ショート (前歯・小臼歯部用)
#5928 ロング (臼歯部クラウン用)
#5929 フラット (前歯部用)

50mm 60mm 95mm
●ワイヤーチップ (前臼歯部ブリッジ用)
●セラムチップ (セラミック製 ロングブリッジ用)

歯科用電動式ハンドピース クラウン・ブリッジ オートリムーバー SR


商品構成

- ハンドピース SR (オートリムーバー本体)
- フック#5925 90度 (ブリッジ)
- フック#5927 ショート (前歯・小臼歯部)
- フック#5928 ロング (臼歯部クラウン)
- フック#5929 フラット (前歯部 クリップ付)
- ワイヤーチップ 50mmワイヤー付 (前臼歯部ブリッジ)
- ワイヤーチップ 60mmワイヤー付 (前臼歯部ブリッジ)
- セラムチップ 95mmワイヤー付 (セラミック製 ロングブリッジ)
- 交換ワイヤー×3種 (50・60・150mm各1本入)
- ワイヤーチップ用ネジ
- ドライバー

■標準価格 77,000円 601200

- 販売名 クラウン・ブリッジ オートリムーバー
- 一般的名称 歯科用電動式ハンドピース
- 医療機器承認番号 22000BZX00742000
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器

関連商品

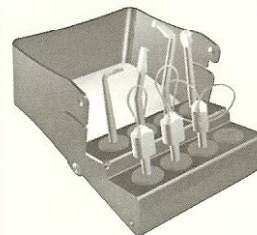

フック・チップ収納用滅菌ボックス

フックやチップの紛失を防ぎ一目で収納チップがわかります。清潔なフック・チップ収納用滅菌ボックスです。オートクレーブ滅菌(136℃以下)

■標準価格 5,400円 601202

●標準価格の後の6ケタの数字は商品コードです。●受給商品の標準価格は、2011年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

製造 アントジール

製造販売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18 〒564-8650 TEL:06-6380-2525

東京本社 東京都台東区上野2-11-15 〒110-8513 TEL:03-3834-6161

www.dental-plaza.com

●この印刷物は環境にやさしい「植林木使用紙」「天然植物油脂大豆油インク」を使用しています。